

# PrograBase 2

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®

Unterstützte Geräte	Betriebssysteme	Systemvoraussetzungen
Programat P 300 & 300/G2 Programat P 500 & P500/G2 Programat P 700 & P700/G2 Programat EP 3000 & EP 3000/G2 Programat EP 5000 & EP 5000/G2 Programat CS Programat S1	Windows XP (inkl. Microsoft .NET Framework 2.0* und Service-pack 2) Windows Vista Windows 7	Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Farben mind. 256 RAM mind. 256MB CPU: 1 GHz Mind. 11 MB freier Speicher Internetanschluss

## Installation

Nach dem Einlegen der CD in das Laufwerk startet die Installation automatisch. Zum Durchführen folgen Sie bitte den Anweisungen des Installationsassistenten.

PrograBase 2 kann auch ohne angeschlossenem Brennofen verwendet werden. Zur Datenübertragung und zur virtuellen Bedienung verbinden Sie bitte den Brennofen mit ihrem Computer (USB-Downloadkabel im Lieferumfang des Ofens enthalten).

## Programmstart


Starten Sie PrograBase 2 nach Abschluss der Installation über das Startmenü Ihres Computers

Wählen sie einen Brennofen

Virtuelle Fernbedienung

Programminformationen

Navigationsleiste zur Funktionsauswahl

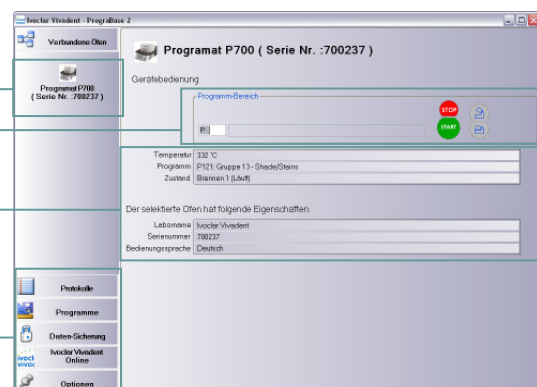


## Einstellungen

Unter dem Button „Optionen“ werden die Programmeinstellungen definiert

Wählen Sie zwischen den Sprachen  
Deutsch, Englisch, Französisch,  
Spanisch, Portugiesisch oder Italienisch



Einstellen der gewünschten Temperatur  
Masseinheit (Celsius oder Fahrenheit)

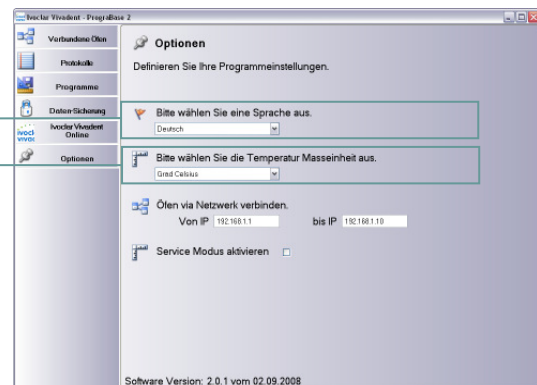

\*) Wenn Microsoft .NET Framework 2.0 auf Ihrem Computer nicht vorhanden ist, wird dies bei der Installation auf Ihrem Computer mitinstalliert. Benötigter Speicherplatz ca. 300 MB.


## Funktionsbereich „Protokolle“

Laden, Editieren und Verwalten von Brennprotokollen

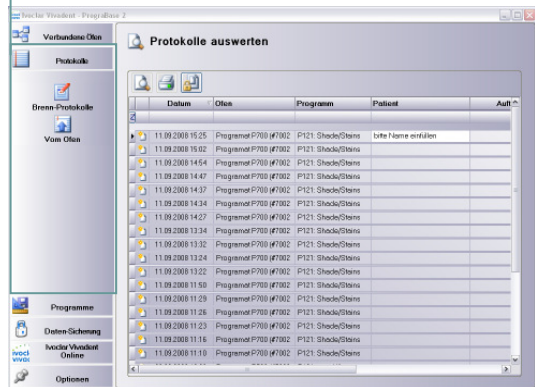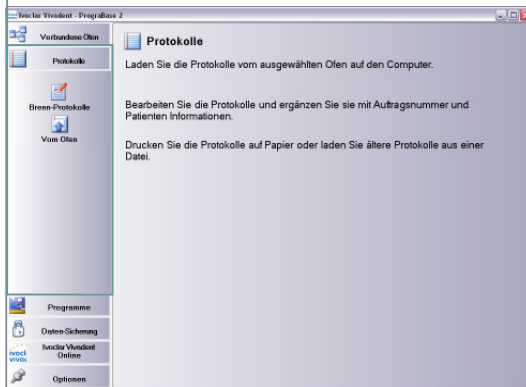

## Funktionsbereich „Programme“

Laden, Editieren und Verwalten von Brennprogrammen

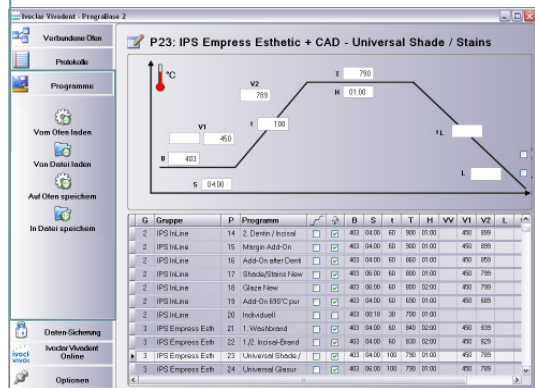


## Funktionsbereich „Datensicherung“

Speichern aller Programmparameter per Mausklick



## Funktionsbereich „Ivoclar Vivadent Online“

Verbindung mit der Herstellerseite per Mausklick

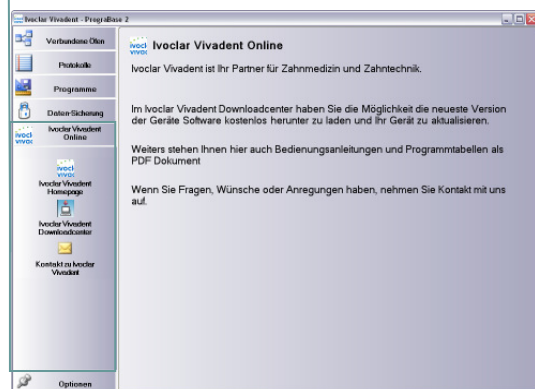

Ivoclar Vivadent AG  
 Bendererstr. 2  
 FL-9494 Schaan  
 Fürstentum Liechtenstein  
 Tel. +423 / 235 3535  
 Fax +423 / 235 33 60  
 www.ivoclarvivadent.com

Serviceline:  
 Tel. +423 / 235 36 36

