

Programat® EP 5010

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V4.1 01.02.2018	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • WLAN-Funktion wurde verbessert • Push-Funktion kann getestet werden • Pressdaten sind nach dem Pressvorgang länger sichtbar • Multimediadateien können direkt gelöscht werden • Diverse Fremdsprachen wurden optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Aktuelle, ausgelieferte Version
V4.0 28.04.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neu mit FPF-Funktion (Fully automatic Press Function) • Neue Programme bzw. neue Programmstruktur bei IPS Style, IPS e.max Press Schichttechnik, IPS e.max ZirPress Schichttechnik, IPS e.max ZirCAD Maltechnik, IPS e.max CAD Crystall/Glaze, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS d.SIGN, IPS e.max ZirCAD Schichttechnik • Optimiertes Vakuumtestprogramm • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V3.0 08.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style, IPS Ivocolor und IPS e.max Press MT • In-Prozess Entfeuchtung: Funktion zum Schutz des Vakuumsystems vor Verunreinigungen und deren Folgeschäden • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V2.1 09.04.2015	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® EP 5010

V2.0 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Programat Infrarottechnologie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Optimierte Objekterkennung - speziell bei kleinen Objekten ○ IRT Plus Modus speziell für Opaquerbrände und komplexe Arbeiten ○ Neues IRT Menü mit Schnellzugriff direkt aus dem Programmscreen • Neue Brennprogramme für IPS InLine Pulver Opaquer (P21, P221, P241) • Neue Pressprogramme für IPS e.max Press Multi • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V1.1 06.06.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Die Software wurde auf die Anforderungen der Programat App (für iPhone) abgestimmt und diverse Softwareoptimierungen wurden umgesetzt • Das Ansprechverhalten bzw. die Geschwindigkeit des Touchscreen wurde beschleunigt • Diverse Optimierungen im Bereich der Programat Infrarot Technologie wurden integriert 	Nicht mehr erhältlich!
V1.0 10.05.2014	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Version 01.02.2018