

Programat® P510

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V6.0 11.03.2019	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neues Programm für IPS Style Pastenopaquer • DSA-Analyse optimiert • DSA Protokollierung implementiert • Neu mit IRT3-Funktion zur Anzeige der Objekttemperatur während der Abkühlung und Anzeige des idealen Entnahmezeitpunkts • Optimiertes Vakuumtestprogramm • Optimierte Entfeuchtungsfunktion • Erweiterte Sonderzeichen • Akustischer Feedback Touchscreen • WLAN-Funktion verbessert • Diverse Fremdsprachen optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Aktuelle, ausgelieferte Version
V5.1 01.02.2018	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • WLAN-Funktion wurde verbessert • Push-Funktion kann getestet werden • Multimediadateien können direkt gelöscht werden • Diverse Fremdsprachen wurden optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V5.0 28.04.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neu mit DSA-Funktion (Digital Shade Assistant) nur ab Serien-Nummer 4010005000 (200V-240V / 50-60Hz) bzw. 4011005000 (110-120V / 50-60Hz) verfügbar • Neue Programme bzw. neue Programmstruktur bei IPS Style, IPS e.max Press Schichttechnik, IPS e.max ZirPress Schichttechnik, IPS e.max ZirCAD Maltechnik, IPS e.max CAD Crystal/Glaze, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS d.SIGN, IPS e.max ZirCAD Schichttechnik • Optimiertes Vakuumtestprogramm • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V4.0 08.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style und IPS Ivocolor • In-Prozess Entfeuchtung: Funktion zum Schutz des Vakuumsystems vor Verunreinigungen und deren Folgeschäden • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® P510

V3.1 09.04.2015	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V3.0 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Programat Infrarottechnologie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Optimierte Objekterkennung - speziell bei kleinen Objekten ○ IRT Plus Modus speziell für Opaquerbrände und komplexe Arbeiten ○ Neues IRT Menü mit Schnellzugriff direkt aus dem Programmscreen • Neue Brennprogramme für IPS InLine Pulver Opaquer (P21, P221, P241) • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V2.1 06.06.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Die Software wurde auf die Anforderungen der Programat App (für iPhone) abgestimmt und diverse Softwareoptimierungen wurden umgesetzt • Das Ansprechverhalten bzw. die Geschwindigkeit des Touchscreen wurde beschleunigt • Diverse Optimierungen im Bereich der Programat Infrarot Technologie wurden integriert 	Nicht mehr erhältlich!
V2.0 18.11.2013	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neues Speed Kristallisationsprogramm für IPS e.max CAD (Wichtig: Das Speedprogramm darf nur in Verbindung mit dem speziell dafür vorgesehenen IPS e.max CAD Speed Cristalization Tray verwendet werden) • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V1.1 20.09.2013	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Version 11.03.2019