

Programat®

Anleitung für Software-Updates via USB-Stick (P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010, CS2, CS3):

Ein Software-Update kann mittels USB-Stick einfach auf das Gerät aufgespielt werden. Für das Ausführen des Updates wird ein USB-Memory-Stick benötigt, auf dem sich eine aktuelle Software-Datei befindet (z. B. P510_V1.10.iv). Die Software-Version auf dem USB-Memory-Stick muss aktueller sein als die auf dem Gerät befindliche.

Software-Updates für Programat-Geräte sind gratis unter www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter erhältlich.

Ein Software-Update kann in wenigen Schritten durchgeführt werden:

1. Software-Update öffnen

Drücken Sie auf dem Homescreen auf den Button **[Software-Update]**.



2. Software-Update durchführen




Wenn Sie einen USB-Stick mit Software-Datei bereits angesteckt haben, wird automatisch nach einer gültigen Software-Datei gesucht. Wenn Sie noch keinen USB-Stick angeschlossen haben, stecken Sie ihn an das Gerät an. Drücken Sie auf den Button **[Ausführen]**.

3. Die Anzeige zeigt den Fortschritt des Updates an.

4. Softwareupdate beenden

Folgende Meldungen werden angezeigt:

-  Software-Update erfolgreich
-  Software-Update fehlgeschlagen

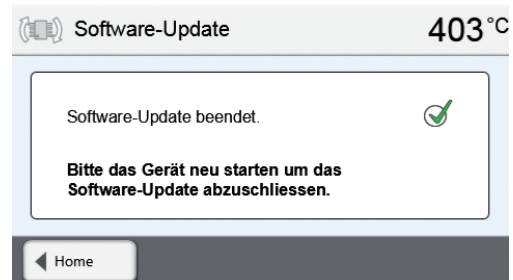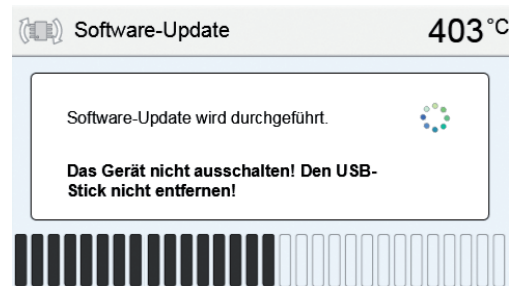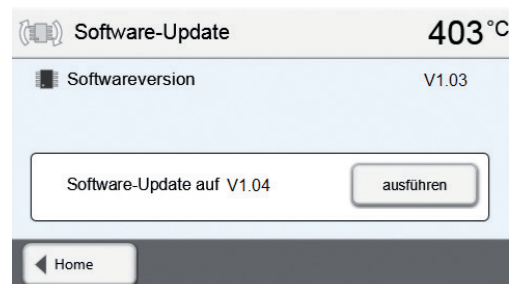

Um das Software-Update abzuschliessen, muss der Hauptschalter an der Rückseite des Geräts aus- und wieder eingeschaltet werden.



Wichtige Information

Bitte beachten Sie, dass abgeänderte Ivoclar Vivadent-Programme bei einem Software-Update unter Umständen überschrieben werden. Individuelle Programme sind davon nicht betroffen und werden nicht überschrieben.