


Aufnahme (Bild oder Video)

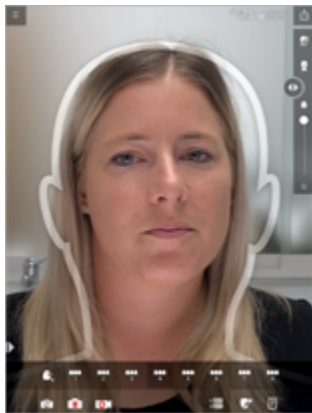


Optimaler Abstand zwischen iPad und Patient:
Gesicht stimmt mit der Kopf-Schablone überein

Hinweis:

- Auf ausreichende Helligkeit achten. Helle **Lichtquelle von vorne** für optimale Beleuchtung
- Kopf-Schablone verschwindet sobald Gesicht erkannt wird

Empfehlung:


- Rückkamera verwenden, da diese eine höhere Auflösung besitzt als die Frontkamera

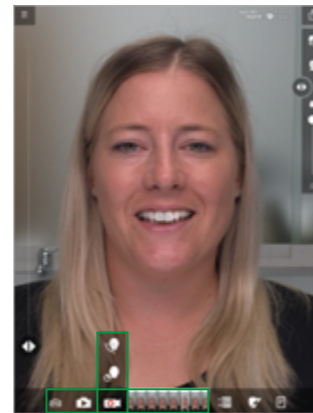

Kamerasymbole

- Wechsel zwischen Vorder-/Rückkamera
 - Wechsel zwischen Live-Modus/ Standbild
 - Video**
 - Drehung des Kopfs nach links/rechts zur Aufnahme einer Bilderserie
 - 3 Sek Aufnahme von Bilderserie
- Bilder aus Video Aufnahmen werden neben dem Video-Symbol dargestellt und können einzeln ausgewählt werden

Vorher-/Nachher-Ansicht

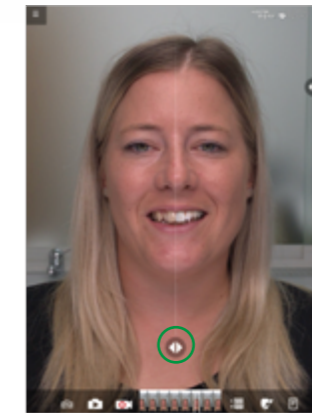


Schieberegler von links nach rechts bewegen zur Vorher-/Nachher-Ansicht

Bleaching der natürlichen Zähne



1. Symbol Zahnform auswählen
2. Bleaching bzw. Aufhellung der natürlichen Zahnsituation

Zahnform auswählen

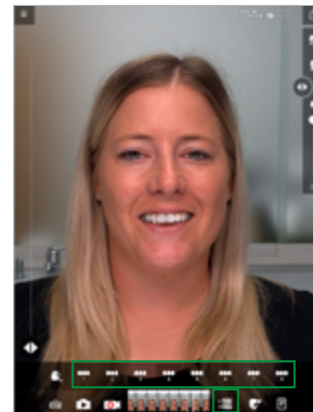

1. Symbol Zahnform auswählen
2. Jeweils eine Nummer steht für eine bestimmte Zahnform

Virtuelle Zähne ausrichten




- Gesichts-Referenzlinien ein-/ausblenden
- Position der virtuellen Zähne verschieben
 - Links/rechts
 - Hoch/runter
 - Vor /zurück
- Zahnform ausrichten und modifizieren

Virtuelle Zähne modifizieren



- Silhouetten-Modus ein/aus
- Rotation der virtuellen Zähne

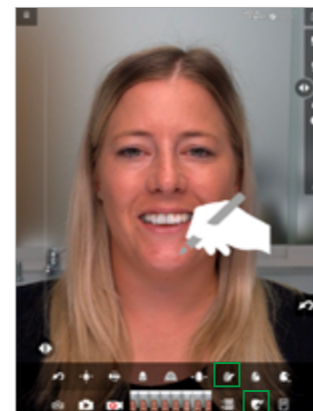


- Individuelle Anpassungen der virtuellen Zähne und der Gingiva
- Hinweis:** Mit zwei Fingern in das Bild hineinzoomen
- Finger oder „Apple Pencil“ als Zeichenstift verwenden

Farbanpassung



- Farb- und Helligkeitseinstellungen für virtuelle Zähne und Gingiva

Aktuelles Bild/Screenshot versenden

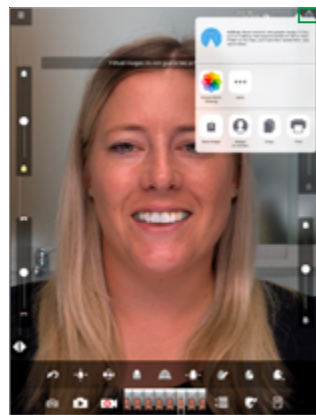

Bildschirmfoto speichern, versenden, drucken


Hinweis:

- Bild wird mit einer Information verschickt, dass es sich um einen unverbindlichen Vorschlag handelt.

Empfehlung:

- immer ein Projekt anlegen um die aktuelle Visualisierung und die Bilder zu speichern

Projekt speichern / öffnen / versenden

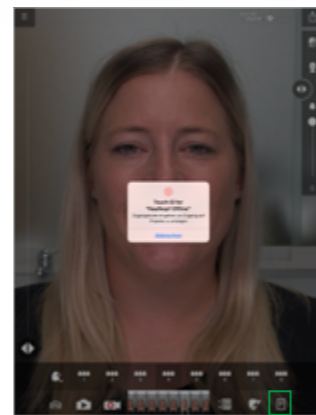


Projektordner öffnen

- Passwort-Eingabe oder „Touch ID“ notwendig


Hinweis:

- passwortgesichert zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff
- Voraussetzung: iPad ist passwortgesichert

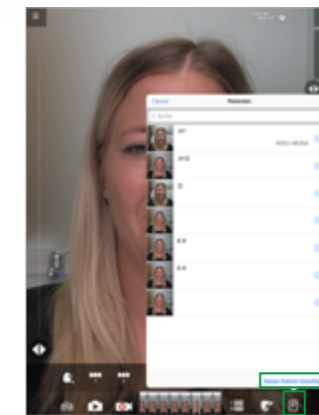


Neuen Patienten hinzufügen:

- in der Projektübersicht auf „Neuen Patient hinzufügen“ klicken
- Patienten-Daten eingeben

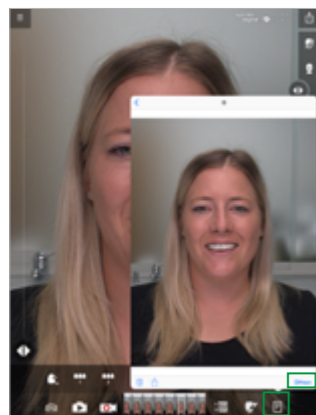


Bestehendes Projekt öffnen:

- auf ein Bild aus der Projektübersicht klicken
- zum Öffnen des Projekts „Öffnen“ wählen

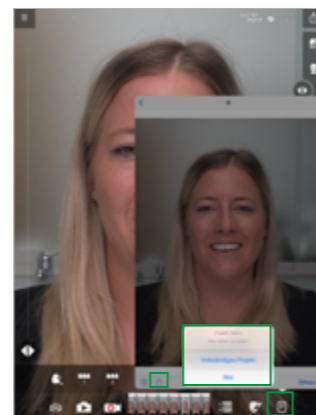

Bestehendes Projekt/Bild versenden:


Gespeicherte Bilder oder Projekte können über das „Teilen“-Symbol versendet werden

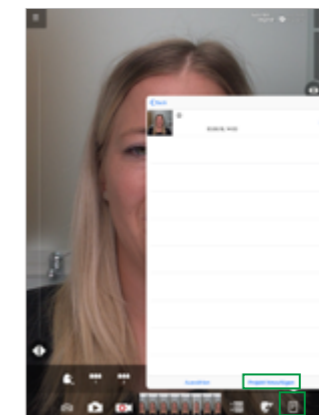

Einem bestehenden Patienten ein neues Projekt hinzufügen:

- Bild des Patienten in der Projektübersicht anklicken
- „Projekt hinzufügen“
- Projekt-Namen eingeben und speichern

Menü

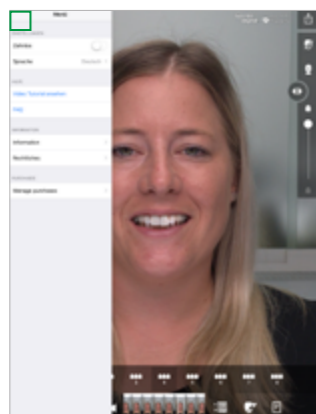

Das Menü enthält unter anderem:

- Video-Tutorial
- Einstellungen
- Information
- Rechtliches
- Sprache wählen
- ...

Weitere Symbole



Zurücksetzen: alle Aufnahmen und Anpassungen löschen




Verformung der virtuellen Zähne



Skalierung



Kieferbreite anpassen „bukkaler Korridor“

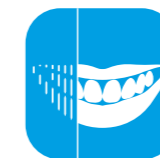

Kommunikations- und Beratungs-Software für dentales Fachpersonal, basierend auf „Augmented Reality“-Technologie.

Erhältlich im Apple App Store für iPads (64bit CPU) mit iOS-Betriebssystem.

